

Лазерный аппарат «АЗОР-АЛМ» для сосудистых патологий

AZOR


СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ:

Используется лазерное излучение с длиной волны 0,97 мкм, которое хорошо поглощается гемоглобином (кровью) и меньше кожей и водой. В результате, фокусируя лазерный пучок специальным световодным инструментом – «Фокусатором» на сосуд, в течении короткого импульса завариваем его, тем самым перекрываем кровоток навсегда, т.е.убираем видимый кровеносный сосуд. При этом за счет короткого импульса выделившаяся в коже энергия не производит патологического воздействия, а вследствие большого поглощения в гемоглобине прошедшей сквозь кожу энергии достаточно, чтобы заварить кровеносный сосуд. Таким образом перемещая пятно лазер-пилота (целеуказатель) по видимому капилляру, и включая лазер нажатием педали, врач «убирает» видимые капилляры. Следует заметить, что, как правило, тонкие капилляры исчезают сразу же, а более крупные значительно темнеют и исчезают через некоторое время. Поэтому не рекомендуется на первой же процедуре стремиться полно-



стью избавиться от всех видимых капилляров. При повторном приеме через неделю значительная часть капилляров исчезнет сама по себе, и врачу останется провести «чистовую» работу. При такой методике пациент получает минимально достаточное количество лазерной энергии для полного косметического эффекта, без болевого ощущения и термических поражений.


ТИПИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ:

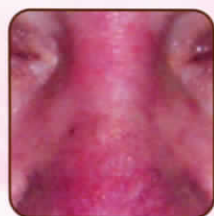


До



После

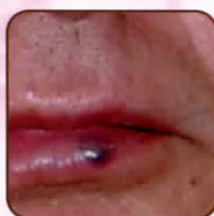


До

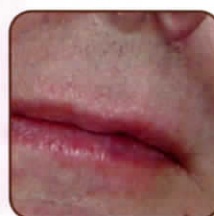

После



До

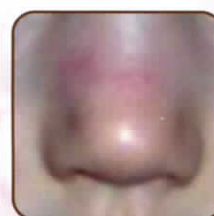

После

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА «АЗОР-АЛМ»



- Практически полное отсутствие болевых ощущений во время процедуры;
- Наглядность косметического эффекта в процессе процедуры.
- Возможность корректировать параметры лазера в реальном режиме времени.
- Низкая дозовая нагрузка исключает ожоги окружающих тканей.
- Нет рецидивов и осложнений при правильном использовании.
- Отсутствие потребности в медикаментах и расходных материалах.
- Процедура проводится амбулаторно.
- Не требуется восстановительный период после процедуры.
- Простой алгоритм управления аппаратом.

ООО «АЗОР», www.azormed.ru, 125480, Москва, а/я54,
(495) 494-31-22, azor@azormed.ru

Лазерный аппарат «АЗОР-АЛМ» для сосудистых патологий



ОТЛИЧИЕ ДАННОЙ МЕТОДИКИ ОТ ДРУГИХ

По сравнению с использованием склерозантов, данная методика чрескожного склерозирования капилляров - неинвазивна, при проведении процедуры не тромбируется сосуд, который может в дальнейшем реканализироваться (восстановиться), т.е. снова проявится патология, а тромб может забить в другом месте полезный сосуд. В нашем случае склерозировается сама вена, что не даст возможность восстановиться кровотоку.

В отличие от аппаратов типа IPL - наш аппарат работает только по патологическим сосудам и не повреждает (заваривает) полезные рабочие капилляры, что происходит при IPL-методиках, когда засвечивается полностью вся поверхность кожи. При этом закрытие мелких рабочих (полезных и не видимых глазом) микрокапилляров приводит к гипоксии эпителия, в результате кожа, лишенная притока питательных веществ, быстро стареет, становится дряблой.



ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ АППАРАТ «АЗОР-АЛМ» СРЕДИ ДРУГИХ ЛАЗЕРОВ?

- алгоритм работы дает возможность подбора индивидуальной программы процедуры в зависимости от конкретного случая.
- небольшие габариты и вес позволяют легко переносить прибор и удобно размещать его на рабочем месте косметолога.
- встроенный измеритель мощности на выходе световодного инструмента,
- система контроля целостности световодного инструмента.
- встроенная оптическая развязка лазерного модуля и световодного инструмента, предохраняет аппарат от выхода из строя.
- воздушный контур охлаждения, позволяет обойтись без специального инженерного обслуживания, не требует замены фильтров.
- гарантийный ресурс лазерного модуля более 50000 часов обеспечивает надежную работу в течении всего срока эксплуатации аппарата.
- высокий КПД лазерного модуля экономит электроэнергию, аппарат работает от бытовой сети.
- простая и удобная работа с панелью управления аппарата.
- стоимость аппарата в 4-6 раз дешевле зарубежных.
- Гарантийный срок - 3 года. (Спец. программа - 5 лет и «Пожизненно»)
- Услуга «Подменный аппарат на время ремонта», что гарантирует постоянное обслуживание клиентов.

ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ АППАРАТ «АЗОР-АЛМ»?

- Достаточно высокая востребованность процедуры обеспечит Вам поток клиентов.
- Небольшие затраты времени на одну процедуру дают высокую проходимость клиентов.
- Гарантированный результат позволит Вам поддерживать высокую цену на процедуру.
- 100% косметологический результат повысит статус Вашего салона и, следовательно, — появление более престижной и обеспеченной категории клиентов.
- Нет сезонных колебаний спроса на процедуру.
- Процедура «привязывает» клиента к салону благодаря качеству проведенной процедуры.
- Различные варианты оплаты аппарата.

Сочетание перечисленных условий гарантирует быструю окупаемость вложений и уверенный

РОСТ ВАШИХ ДОХОДОВ.

Вы можете рассчитать свой вариант ДОХОДА со своими параметрами на нашем сайте.

СМ. ТАКЖЕ НА САЙТЕ ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА «АЗОР-АЛМ» В ХИРУРГИИ И ДЕРМАТО-КОСМЕТОЛОГИИ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН

ООО «АЗОР», www.azormed.ru, 125480, Москва, а/я54,
(495) 494-31-22, azor@azormed.ru