

Лазерный аппарат "АЗОР-АЛМ" в хирургии и дермато-косметологии

AZOR

СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ:

Используется лазерное излучение с длиной волны 0,97 мкм, которое хорошо поглощается водой и гемоглобином (кровью) и в меньшей степени кожей. На сегодняшний день данная длина волны лазерного излучения признана в мировом сообществе хирургов «золотым стандартом» лазерной хирургии. Оптимальное соотношение поглощения в различных средах позволяет проводить резекцию с тонким коагуляционным слоем прилегающих биотканей, с полным гемостазом и отсутствием отека, что обеспечивает полную асептику, сухое операционное поле, малую инвазию, и соответственно, быстрое заживление раны. Для комфортной работы врача рекомендуется использование дымоэвакуатора.



ТИПИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ:



До



После



До



После



До



После

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА «АЗОР-АЛМ»



- Отсутствие болевых ощущений во время процедуры при локальной анестезии.
- Наглядность процедуры. Возможность корректировать параметры лазера в реальном режиме времени.
- Низкая дозовая нагрузка исключает ожоги окружающих тканей.
- Нет рецидивов и осложнений при правильном использовании.
- Практически отсутствие потребности в медикаментах и расходных материалах.
- Процедура проводится амбулаторно.
- Восстановительный период после процедуры - минимален.
- Простой алгоритм управления аппаратом.

www.azormed.ru, 125480, Москва, а/я54, 000 «АЗОР»,
(495) 494-31-22, azor@azormed.ru

Лазерный аппарат "АЗОР-АЛМ" в хирургии и дермато-косметологии



ОТЛИЧИЕ ДАННОЙ МЕТОДИКИ ОТ ДРУГИХ

Использование традиционного медицинского скальпеля всегда сопряжено с кровотечением, мешающим врачу качественно проводить операцию. Открытая рана провоцирует сепсис, в дальнейшем часто требуется ушивать рану, использовать антибиотики. Операция, как правило, сопровождается болевым синдромом и долгим периодом восстановления.

Использование аппаратов с другими длинами волн (0,81 и 1,06 мкм) меньше поглощаемых водой, приводит к глубокому термическому поражению прилегающих тканей, создает толстый грубый коагуляционный слой, провоцирует отек, создает плохо ушиваемую рану и следовательно долгое заживление с образованием рубцов. СО 2-лазер с длиной волны излучения 10,6 мкм, сильно поглощается водой и рассекает ткань, однако, практически не поглощается кровью, и приводит к кровотечению рассеченной раны, что негативно сказывается на проведении операции и дальнейшем заживлении ран.

Использование аппарата «АЗОР-АЛМ» с длиной волны лазерного излучения 0,97 мкм обеспечивает резекцию с тонким коагуляционным слоем прилегающих биотканей, с полным гемостазом и отсутствием отека, что обеспечивает полную асептику, сухое операционное поле, малую инвазию и, соответственно, быстрое заживление раны. Все это в совокупности позволяет врачу комфортно проводить операцию с минимальными негативными последствиями для пациента. Данные возможности аппарата «АЗОР-АЛМ» позволили многие сложные операции перевести в разряд амбулаторных и практически отказаться от антибиотиков.

ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ АППАРАТ «АЗОР-АЛМ» СРЕДИ ДРУГИХ ЛАЗЕРОВ?

- алгоритм работы дает возможность подбора индивидуальной программы процедуры в зависимости от конкретного случая.
- небольшие габариты и вес позволяют легко переносить прибор и удобно размещать его на рабочем месте косметолога.
- встроенный измеритель мощности на выходе световодного инструмента,
- система контроля целостности световодного инструмента.
- встроенная оптическая развязка лазерного модуля и световодного инструмента, предохраняет аппарат от выхода из строя.
- воздушный контур охлаждения, позволяет обойтись без специального инженерного обслуживания, не требует замены фильтров.
- гарантийный ресурс лазерного модуля более 50000 часов обеспечивает надежную работу в течении всего срока эксплуатации аппарата.
- высокий КПД лазерного модуля экономит электроэнергию, аппарат работает от бытовой сети.
- простая и удобная работа с панелью управления аппарата.
- стоимость аппарата в 4-6 раз дешевле зарубежных.
- Гарантийный срок – 3 года. (Спец.программа – 5 лет и «Пожизненно»)
- Услуга «Подменный аппарат на время ремонта», что гарантирует постоянное обслуживание клиентов.

ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ АППАРАТ «АЗОР-АЛМ»?

- Достаточно высокая востребованность процедуры обеспечит Вам поток клиентов.
- Небольшие затраты времени на одну процедуру дают высокую проходимость клиентов.
- Гарантированный результат позволит Вам поддерживать высокую цену на процедуру.
- 100% косметологический результат повысит статус Вашего салона и, следовательно, — появление более престижной и обеспеченной категории клиентов.
- Нет сезонных колебаний спроса на процедуру.
- Процедура «привязывает» клиента к салону благодаря качеству проведенной процедуры.
- Различные варианты оплаты аппарата.

Сочетание перечисленных условий гарантирует быструю окупаемость вложений и уверенный

РОСТ ВАШИХ ДОХОДОВ.

Вы можете рассчитать свой вариант ДОХОДА со своими параметрами на нашем сайте.

СМ. ТАКЖЕ НА САЙТЕ ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА «АЗОР-АЛМ» ПРИ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЯХ: (КУПЕРОЗ, ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИИ, СОСУДИСТЫЕ СЕТКИ И ЗВЕЗДОЧКИ, «ВИННЫЕ» ПЯТНА, ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫЕ ВЕНЫ И ПР.

www.azormed.ru, 125480, Москва, а/я54, ООО «АЗОР»,
(495) 494-31-22, azor@azormed.ru